

Die Anwendung der FLEXOPLUS GENO Ohrmarke zur Gewebeprobeentnahme



I Trennen Sie die vier miteinander verbundenen Ohrmarkenteile in der Mitte
 ❶ Vermeiden Sie dabei jede Berührung des Schneidringes an der Spitze des Dornteiles.

Die Gewebe-Ohrmarke setzen

II Die Gewebe-Ohrmarke in die Caisley Ohrmarkenzange laden. Dazu die folgende Reihenfolge unbedingt beachten:
 a) die Metallklammer an der Lochteilseite (schwarzer Clip) der Zange nach innen drücken und vollständig nach hinten schwenken! Die Klammer kippt zum Drehpunkt der Zange ab ❷.
 b) Das Lochteil mit dem Gewebeprobeentnahmer von innen in die Zangenbacke einsetzen und ganz eindringen ❸.
 c) Die Klammer loslassen. Sie hält die Lochteillasse jetzt fest ❹.
 d) Das Dornteil vom Lochteil trennen ❺.


III Stecken Sie das Dornteil auf den metallenen Führungsdorn in der Zange und überwinden Sie die Rastung am Ende ❻.
 Berühren Sie beim Aufstecken nicht den Schneidring und den Dorn, sondern fassen Sie das Dornteil an der Lasche an, um Infektionen der Ohrwunde zu vermeiden und die Probe nicht zu verunreinigen.
 Die Zange ist jetzt zur Entnahme der Gewebeprobe und Anbringung der Ohrmarke vorbereitet.

IV Bringen Sie die Gewebe-Ohrmarke
 a) zwischen den beiden Knorpelleisten
 b) ohne Blutgefäße zu verletzen
 c) ca. 1/3 bis 1/2 Ohrlänge vom Ohrgrund entfernt
 d) mit dem Dornteil am Außenohr und
 e) dem Lochteil am Innenohr an ❼.
ACHTUNG
 Die Zange mit der Ohrmarke nur einmal - aber zügig und kräftig - bis zum Anschlag schliessen!

V Anschließend die Zange unmittelbar nach dem einmaligen kräftigen Schliessen bis zum Anschlag wieder aufspringen lassen. Ziehen Sie die Zange im Bogen nach unten vom Ohr des Tieres ab, so dass das Lochteil nach vorn aus der unteren Zangenbacke gleitet.

Der Schneidring stanz ein Loch in das Ohr. Das anfallende Gewebe wird in das Probenröhrchen überführt, welches durch das Projektil hermetisch verschlossen wird. Das Probenröhrchen verbleibt in der Zangenbacke.

VI Um das Probenröhrchen aus der Zange zu entnehmen, drücken Sie das Röhrchen mitsamt dem schwarzen Clip und dem metallenen Bügel nach oben, so dass das Probenröhrchen aus der Zangenbacke in Richtung der Zangenöffnung bewegt wird ❸. Dann die Metallklammer loslassen. Das aus der Zangenbacke vorstehende Probenröhrchen kann nun leicht aus der Zange entnommen werden ❹.
 Bitte senden Sie das Probenröhrchen unter Verwendung der mitgelieferten Versandtaschen an die zuständige Firma Qualitas AG.

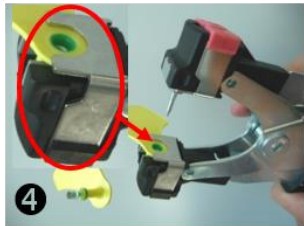

Im Lieferzustand ist die Zange mit einem grauen Stützring auf dem metallenen Führungsdorn versehen, der das Dornteil der Ohrmarke beim Einziehen abstützt. Sollte der Stützring sich beim Gebrauch der Zange lösen, clippen Sie ihn erneut auf den Führungsdorn



Das Probenröhrchen nicht im Bereich von Einstreu oder Spaltenboden aus der Zange entnehmen - Verlustgefahr!