

Anleitung zur Entnahme einer Haarprobe



- Saubere Hände + sauberes Tier, verschmutzte Proben können nicht typisiert werden.
- Haare von anderen Tieren unbedingt vermeiden.
- Haare **gegen** die Wuchsrichtung ausrupfen.



- Für eine erfolgreiche Typisierung werden 50 – 100 Haarwurzeln benötigt.
- Haare bündeln und mit Klebeband befestigen.



- TVD-Kleber auf die Tüte in das Feld *TVD Etikett* kleben.
- Sicherstellen, dass der TVD-Kleber zu den Haaren des Tiers passt.



- Haarbündel in die Tüte legen.
- Tüte mit der Papierlasche schliessen.



- Vorgedruckten Barcode oben rechts auf der Tüte unbedingt frei lassen.
- TVD-Kleber des Tieres ist auf der Tüte aufgeklebt, dann braucht es keinen Auftrag.



- Sie haben keinen TVD-Kleber des Tieres: online bei der Zuchtorganisation Auftrag erstellen und ausdrucken.
- Tüte an das Auftragsformular anheften.

Die **Tüte** in einem frankierten Briefumschlag an folgende Adresse schicken:

QUALITAS AG
Genomische Selektion
Chamerstrasse 56
6300 Zug